

Wirkungsvoll und frei von medikamentösen Nebenwirkungen

Die **amplitudenmodulierte Mittelfrequenz-Elektrotherapie** mit **AmpliMed bedside** wird schon seit Jahren erfolgreich in der Veterinärmedizin eingesetzt.

AmpliMed nutzt die drei wichtigen Therapie-Frequenzen:

- **Mittelfrequenz** (Grundfrequenz 2 kHz)
- **Niederfrequenz** (Amplitudenmodulation 2Hz bis 100Hz)
- **Schwelfrequenz** (Amplitudenmodulation 1-100 Imp./Min.)

Diese Kombination sorgt für eine optimale Durchströmung des Gewebes, so dass die tief liegenden Nerven und Muskeln stimuliert werden können.

AmpliMed bedside ist einfach anzuwenden. Die ausführliche Anwendungsbeschreibung und Therapiekarten erläutern den Gebrauch auf leicht verständliche Weise.

AmpliMed bedside kann vom Arzt oder Tiertherapeuten, aber auch von im Umgang mit Tieren erfahrenen Personen eingesetzt werden.

Mögliche Einsatzgebiete:

Schmerztherapie . reaktive Muskeltonisierung . Zellgewebsaktivierung . Durchblutungsfördernd . Lymphrückfluß unterstützend . Verbesserung der Gewebsernährung und des Stoffwechsels . Unterstützung der Regeneration

Bewährte Indikationen bei Pferden und Hunden:

Wirbelsäulenerkrankungen z.B. Dackellähme, Spondylose, Kissing spinnes . Arthrosen bei Schale, Spat HD . Hufrollenentzündung . Humeruskopfnekrose . Ellenbogendysplasie . Arthritis . Myopathien . Neuralgien . Muskelverspannungen . Muskelatrophie z.B. bei Schonhaltungen . Lähmungen . Wundheilungsstörungen . Lymphödeme . asthmatische Beschwerden . Tendinopathien und Insertionsdesmopathien unterschiedlicher Lokalisation

AmpliMed bedside ist ein **Medizinprodukt** der Klasse IIa, nach Anhang IX der Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte.


Anwendungsbeispiele:



Problemen der Wirbelsäule, Verspannungen.



Verspannungen der Halsmuskulatur. Mit einem 4er Kabel können beide Seiten therapiert werden.

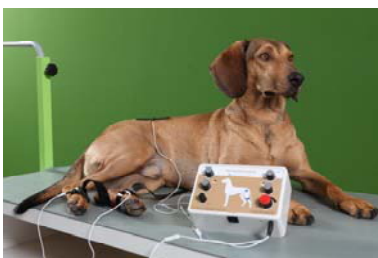

Problemen auf der Hinterhand, Inkontinenzproblemen



Arthrose